



Optimieren Sie Ihre Einkäufe !

intelliMed
Swiss Optimizer



STEPTY™

STERILE EO

- Wundschnellverband mit blutstillendem Druckpolster (Wundschutz)
- EO-Gas-sterilisiert
- Hergestellt in Japan

Exzellente blutstillende Wirkung durch Kompression nach dem Entfernen der Nadeln : STEPTY NO.80

Nach dem Entfernen der Nadel für die Blutentnahme, einer intravenösen Leitung mit einer großen Nadel (14-24 Gauge), wird eine gute blutstillende Wirkung durch die 6 mm dicke Wundauflage für exzellente Blutabsorption und Kompression durch Klebeband aus Urethan-Vliesstoff mit der notwendigen Elastizität ermöglicht.



Klebefläche	39 x 80 mm
Polsterfläche	27 x 15 mm
Pack/UM	50

Eigenschaften

- 6 mm dicke Wundauflage mit exzellenter Blutabsorption, länglich (27 mm), quer zur Gesamtlänge. Deckt die Einstichstelle ab und übt gezielten Druck aus.
- Es wurde hypoallergener Acrykleber verwendet.



Verwendungsweise

SCHRITT 1 Entfernen Sie das Schutzpapier **nicht vollständig**. Kleben Sie den mittleren Bereich des Klebebandes auf die Haut auf und dehnen Sie ihn dabei um etwa **1 cm** (bei STEPTY P um 2 cm).



SCHRITT 2 Üben Sie keine Kraft auf das Klebeband aus, sobald das Schutzpapier entfernt wurde, sondern **streichen Sie darüber**, um es anzukleben.



contact@intellimed.ch / www.intellimed.ch

intelliMed



Zum E-Shop



intellimed.ch