



Optimisez vos achats !

intellimed
Swiss Optimizer



STEPTY™

STERILE EO

- Pansement adhésif avec tampon compressif à action hémostatique (Protection du pourtour de la plaie)
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Fabriqué au Japon

Excellente capacité hémostatique par compression dès le retrait des aiguilles : STEPTY NO.80



Dès le retrait de l'aiguille utilisée pour la prise de sang, ou pour une perfusion (grosses aiguilles de calibres 14 à 24), l'action hémostatique du pansement est optimale grâce à la capacité d'absorption du tampon de 6 mm d'épaisseur et à la capacité de compression du ruban non-tissé en uréthane pourvu d'une élasticité adaptée.



Dimensions (Ruban)	39 x 80 mm
Dimensions (Tampon)	27 x 15 mm
Pack/UM	50

Caractéristiques

- Tampon de 6 mm d'épaisseur doté d'un excellent pouvoir absorbant : Forme oblongue longitudinale de 27 mm
- Adhésif acrylique hypoallergénique

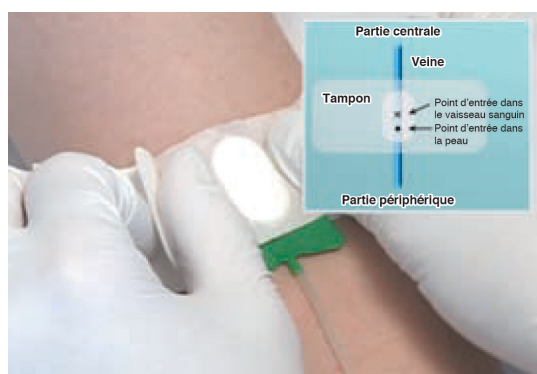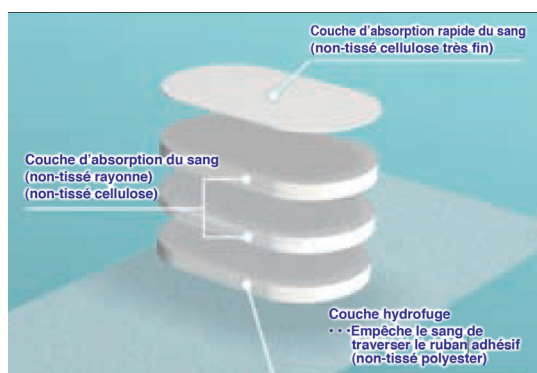

Mode d'emploi

ÉTAPE 1

Ne pas retirer complètement le papier protecteur. Appuyer la partie centrale du ruban adhésif sur la peau en étirant d'environ 1 cm (pour STEPTY P, 2 cm).

Maintenir avec le papier protecteur.



Ne pas étirer au-delà de la limite !

ÉTAPE 2

Dès que le papier protecteur a été retiré, ne pas appuyer sur le ruban mais le lisser pour le faire adhérer.

Laisser le papier protecteur à cet endroit.



Ne pas étirer les extrémités du pansement.

Correct

Incorrect

[Pointe]

Si l'extrémité forme une pointe, la force se concentre et risque de provoquer une éruption cutanée.

contact@intellimed.ch / www.intellimed.ch

intellimed



Vers l'E-Shop



intellimed.ch